

Wirtschaftlichkeit für Sie – Sicherheit für Ihre Patienten.

Geschwindigkeit ohne Stress.

Die effiziente Wirkungsweise Ihres CORONAFlex rechnet sich für Sie. Denn Sie benötigen bei der Zahnersatzentfernung wesentlich weniger Handgriffe und sparen wertvolle Zeit. Darüber hinaus vermeiden Sie mit CORONAFlex den Stress einer manuellen Entfernung. Die kontrollierte Kraft Ihres CORONAFlex bringt Ihnen und Ihren Patienten ein wesentliches Mehr an Sicherheit.

Schnell und sicher – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- **Zügige, effiziente Entfernung von Zahnersatz**
- **Vollständig sterilisierbar, keine Wartung notwendig**
- **Schmerzarme Kronenentfernung, beeindruckend angenehm für Ihre Patienten**
- **Sichere Anwendung, Zahnersatz bleibt meist unbeschädigt und kann wiederverwendet werden**



„Dass sich Zahnersatz so schnell und schmerzlos lösen lässt, erstaunt meine Patienten immer wieder. Und dass er dabei ganz bleibt, freut sie umso mehr.“



KaVo. Dental Excellence.

Mat.-Nr. 1.004.1235 07/08 de Technische Änderungen vorbehalten. Geringfügige Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. © Copyright KaVo Dental GmbH.

Effizient und schonend – Zahnersatz professionell entfernen.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com



KaVo. Dental Excellence.

Kraftvolle Höchstleistung – nach einem intelligenten Prinzip.

Effiziente und schonende Zahnersatzentfernung.

Durch die intelligente Technik des CORONAFlex können Sie Kronen, Brücken und Provisorien sicher lösen und anschließend – weil meist beschädigungsfrei – sogar wiederverwenden. Diese Möglichkeit haben Sie ausschließlich mit dem CORONAFlex von KaVo.

Die Funktionsweise: Per Druckluft wird aus dem Schaft ein Kolben in die Spitze des Kronenabziehers gepresst. Der daraus resultierende kurze Impuls wirkt auf die Struktur des Zements, zerstört sie schlagartig und hebt so die Haftkraft auf.

Komfortable und sichere Anwendung.

Stecken Sie Ihr CORONAFlex einfach auf die KaVo MULTIflex-Kupplung, genau so wie z.B. auch Ihre Turbine. Sie können den Schlagkopf um 360° drehen und so auch schwierige Stellen einfach erreichen. Die Kraftübertragung mit dem CORONAFlex erfolgt völlig kontrolliert und sicher, die Schlagkraft ist über den Drehknopf stufenlos einstellbar.

Professionell und schonend.

Die Entfernung von Zahnersatz wird für Ihre Patienten spürbar angenehmer. Verstärken Sie bei Ihren Patienten damit das Gefühl, sich in guten Händen zu befinden. Da Sie den Zahnersatz meist wiederverwenden können, profitieren Ihre Patienten außerdem von der Kostenersparnis.

Umfassende Möglichkeiten – für jede Behandlungssituation.

Flexibel und sicher agieren.

Mit dem Zubehör Ihres CORONAFlex sind Sie auf jede Art von Zahnersatzentfernung optimal vorbereitet.



Einfache Anwendung mit der Zange.

In 80 % aller Fälle werden Sie die Zange direkt am Kronenrand einsetzen. CORONAFlex einfach einhängen und den Schlagimpuls auslösen – er wirkt effektiv und schmerzlos auf die Zementstruktur. Die Krone löst sich sicher und in der Regel ohne Beschädigung.



Einfache Anwendung mit der Klebeklammer.

Auch für die bisher so komplizierte Kronenentfernung unter Platzmangel im molaren Bereich bietet Ihnen CORONAFlex eine intelligentere Lösung. Befestigen Sie die mitgelieferte Klammer auf der Krone, dann CORONAFlex ansetzen und den Impuls auslösen – das ist alles.



Einfache Anwendung mit der Schlaufe.

Führen Sie bei Brückenkonstruktionen die Schlaufe einfach unter der Brücke durch. Anschließend den speziellen Handgriff einhängen, CORONAFlex ansetzen und auslösen. Die Elastizität der Schlaufe ist so gering, dass der Schlagimpuls direkt – kurz und schmerzlos – übertragen wird.



Vielfältige Anwendungsgebiete – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Gelöster Brückenanker und erforderliche Neuzementierung
- Extraorale Reparatur der Verblendung
- Notwendige endodontische Behandlung
- Definitives Zementieren von provisorisch befestigtem Zahnersatz
- Fraktur eines Brückenglieds
- Korrektur einer Fehlzementierung
- Farbliche Veränderungen der Verblendung auf Patientenwunsch



Handauslöser

Drehknopf zur exakten
Justierung der Schlagkraft.

Der Schlagkopf ist um 360° drehbar,
auch schwer zugängliche Stellen sind
somit leicht zu erreichen.

CORONAFlex wird einfach
auf die praktische MULTIflex-
Kupplung aufgesteckt.

„Meinem Zahnarzt vertraue ich zu
100 Prozent. Hier weiß ich, dass ich die
optimale Behandlung bekomme.“

