



Think Endo cordless!



entran

Endodontie. Kabellos!



Frei und kabellos bewegen.

Alles auf einmal zu wollen – absolute Bewegungsfreiheit ohne lästigen Kabelzug, sicheres Behandeln, hervorragende Sicht beim Eingriff – ist jetzt möglich. Mit Entran, dem kabelfreien Handstück von W&H.

Feinfühlinger arbeiten ...


Die Ergonomie eines Handstücks entscheidet mit über den Erfolg der endodontischen Behandlung. Entran überzeugt als kabelfreie Lösung für die maschinelle Wurzelkanalaufbereitung nicht nur mit größtmöglicher Bewegungsfreiheit. Auch das besonders geformte Winkelstück mit seinem niedrigen Gewicht zögert das Ermüden der Hand deutlich hinaus. Mehr noch: Damit Auge und Hand optimal zusammenarbeiten können, ist der Kopf von Entran angenehm klein und kompakt. Für eine bessere Sicht auf das Anwendungsfeld.

Dank Easy Click-Funktion lassen sich Gerät und Handstück schnell und einfach zusammenstecken.

Das Handstück kann beliebig gedreht werden – um insgesamt 360° – frei beweglich.

... in allen Anwendungsbereichen

Entran eröffnet Ihnen die ganze Palette endodontischer Eingriffe mit rotierenden Wurzelkanalinstrumenten zur Wurzelkanalaufbereitung. Gleich ob mit der Crown-Down- oder der Single-length-Technik.

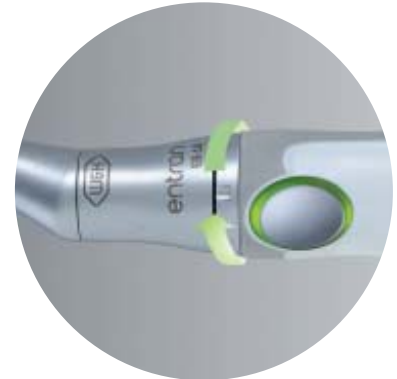

Sichere Eingriffe.

Erfolgreiche Wurzelkanalbehandlungen erfordern intelligentes Werkzeug. Entran reagiert sofort, wenn die Feile das von Ihnen eingegebene Drehmoment erreicht. Eine automatische Entlastung, die Ihre Eingriffe noch sicherer macht und heute unentbehrlich ist.

Alle Funktionen integriert

Alle Funktionen, die Sie für den sicheren souveränen Eingriff brauchen, sind im Entran-Gerät integriert. Dabei haben wir besonderen Wert auf einfachste Handhabung und höchste Zuverlässigkeit gelegt.

Durch einfachen Tastendruck stellen Sie das Drehmoment ein. Der gewählte Wert erscheint auf der LED.

Während des Eingriffs leuchtet bei 75% des eingestellten Drehmoments der Kontroll-LED-Ring. Entran ist W&H-Technologie der neuesten Generation und bietet Ihnen als kleines, kompaktes Cordless-Gerät ein Höchstmaß an Sicherheit.



Auto Reverse

Wird das von Ihnen eingestellte Drehmoment erreicht (1), läuft das Antriebsstück im Linkslauf (2), damit die Feile frei wird. Dann stoppt der Antrieb (3)



Auto Forward

Wenn das eingegebene Drehmoment erreicht wird (1), dreht die Feile auch im Auto-Forward-Modus automatisch in die Gegenrichtung (2), damit die Feile frei wird. Dann läuft sie im Rechtslauf weiter (3).



Stabile Drehzahl

Für die stabile Drehzahl von 300 rpm am Wurzelkanalinstrument sorgt sowohl die präzise arbeitende miniaturisiert Elektronik als auch der in dieser Klasse einzigartige und ausdauernde Li-Ionen-Akku, der jederzeit aufgeladen werden kann – ohne negative Auswirkung auf die Langlebigkeit. Wenn die Akku-Kapazitätsanzeige blinkt, kann noch ein Patient fertig behandelt werden. Mit einer vollen Akku-Ladung sind ca. 30 Behandlungen möglich.



Komfortabler behandeln.

Entran bietet Ihnen mehr als die Summe seiner einzelnen Features. Nicht nur Bewegungsfreiheit, Sicherheitsfunktionen und einfache Handhabung entscheiden darüber, mit welchem Instrument man lieber arbeitet.

Schneller Feilenwechsel

Die Druckkopfspeicherung ermöglicht eine einfache und sichere Aufnahme der Feile.

Ergonomisches Winkelstück

Der Winkelstück-Aufsatz wurde nach ergonomischen Anforderungen geformt. Er entlastet beim filigranen Arbeiten die Hand und verzögert ihr Ermüden.

Griffiges Antriebshandstück

Entran liegt perfekt in der Hand. Die graue Soft-Touch-Oberfläche des Antriebshandstücks bietet Ihnen höchsten Komfort und Griffigkeit.

Schlanker Körper

Der schmale Körper und der kleine Kopf vergrößern Ihr Sichtfeld beim Eingriff. Zwei wichtige Details, die ebenfalls den Behandlungserfolg fördern.

Hygiene und Pflege

Der Winkelstück-Aufsatz ist sterilisierbar und thermodesinfizierbar. Antriebshandstück und Ladestation sind wischdesinfizierbar, lassen sich schnell und einfach reinigen und sind bei der nächsten Behandlung sofort wieder einsatzbereit.

Lieferumfang

- > Antriebshandstück
- > Winkelstück-Aufsatz
- > Ladestation
- > Li-Ionen-Akku, 3,7 V
- > Netzkabel

Zubehör

- > Handstückablage
- > W&H Service Oil F1, MD-400
- > Sprühkopf mit Spray-Adapter für Hand- und Winkelstücke
- > W&H Assistina-Adapter für Winkelstück-Aufsatz

Garantie


- > **24 Monate:** Antriebshandstück, Winkelstück-Aufsatz, Ladestation
- > **12 Monate:** Akku



Technische Daten.

CE
0297

Winkelstück-Aufsatz EB-16

> Übersetzungsverhältnis	16:1
> Kupplungstyp	W&H-Kupplung
> Empfohlene Feilen nach EN ISO 1797-1:1995	Feilen zur rotierenden Wurzelaufbereitung für 300 rpm Schaft-Ø (Typ 1) 2,35 mm
> Gewicht	35 g
> Hygiene 	sterilisierbar / thermodesinfizierbar



Antriebshandstück EB-3 H

> Akku-Typ	Li-Ion, 3,7 V
> Nennkapazität	680 mAh
> Drehzahl	300 rpm an der Feile
> Drehmomentstufen	4,0 max. 4,0 Ncm 2,5 max. 2,5 Ncm 1,5 max. 1,5 Ncm 1,0 max. 1,0 Ncm 0,5 max. 0,5 Ncm
> Gewicht	85 g
> Hygiene	wischdesinfizierbar



Ladestation

> Netzspannung	100–240 V (+/-10%)
> Frequenz	50–60 Hz
> Maße (B x T x H)	95 x 159 x 95 mm
> Gewicht	265 g
> Hygiene	wischdesinfizierbar



W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t +43 (0) 6274 6236-0
f +43 (0) 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com



Bestellen Sie Ihr Entran über Ihren Fachhändler.